



**Arbeitslistenansicht nach log in:**

Die Anwahl einer Untersuchung im Arbeitslistenbereich öffnet die Untersuchung zur Ansicht.

Eingeloggter User  
Log off - Systeminformation - Handbuch

**Filterbereich/Suchmaske**

**Arbeitslisten Ansicht, ggf. mit vordefinierten Filtern**

GEADMIN

**Filter**

Patientenname:

Patienten-ID:

Zugangsnr.:

Geb.-datum:

Überweisender Arzt:

Untersuchungsstatus ==

Studienbeschreib.:

Standort:

Überweisende Dienstleister:

**Modalität**  Alle

CR  DX  CT

MR  US  PET/CT

PT  NM  XA

RF  MG  GM

OT  SC  OCT

**Unters.datum**

Heute  Gestern  Letzten 7 Tage

Alle  Datumbereich

Beginn:  Ende:

Einschließlich:  Studien ohne Bilder

	Name	Geb.-datum:	Beschreibung	Unters.datum ↓	Modalität	Se	Bi	Überweisender Arzt	Patienten-ID	Zugangsnr.	Untersuchu...	Geschl...	Standort	Überweisende Dienstleister
		22.08.1976	Gastroenterologie Klinik	07.12.2018 08:59:16	US	1	8		353312	VPUSE116192	Verified	Male	Unspecified	
		13.02.1965	Angiologie Untersuchung	06.12.2018 10:57:06	US	1	6		214849	7838681	Completed	Female	Unspecified	
		07.01.1950	Thorax ap liegend	30.06.2018 09:07:20	CR	1	1		269525	7754773	Completed	Female	Unspecified	
		13.02.1965	Angiologie Untersuchung	02.05.2018 07:54:10	US	1	30		214849	7721945	Completed	Female	Unspecified	
		11.06.1950	Gastroenterologie Klinik	06.02.2018 11:47:26	US	1	7		45335	VPUSE109156	Read Offline	Male	Unspecified	
		11.06.1950	Gastroenterologie Klinik	06.02.2018 11:47:07	US	1	8		45335	VPUSE109155	Read Offline	Male	Unspecified	
		11.06.1950	Untersuchung Gastroenterologie	06.02.2018 11:41:22	US	1	18		45335	7676345	Completed	Male	Unspecified	
		11.06.1950	Schäldruesenszintigraphie Tc...	26.01.2018 11:13:25	NM	4	5		45335	7664456	Completed	Male	Unspecified	
		11.06.1950	Schäldruesenszintigraphie Tc...	26.01.2018 10:15:00	NM	0	0		45335	7664164	Completed	Male	Unspecified	
		06.09.1969	Angiologie Untersuchung	04.12.2017 00:00:00	US	0	0		369464	7842990	Completed	Female	Unspecified	
		07.05.1946	Sonographie Neurologie	06.11.2017 17:14:34	US	1	30		179842	7628137	Completed	Male	Unspecified	
		07.05.1946	MR Schädel Kurzprotokoll	06.11.2017 15:24:10	MR	10	515		179842	7627908	Completed	Male	Unspecified	
		25.03.1973	Finger 4 re	17.07.2017 13:06:12	CR	2	2		56315	7570285	Completed	Female	Unspecified	
		25.03.1973	OP BV	07.06.2017 07:45:00	OT	0	0		56315	7550144	Completed	Female	Unspecified	
		25.03.1973	Röntgen Bahnhof	05.06.2017 10:31:15	CR	1	2		56315	7549555	Completed	Female	Unspecified	
		06.09.1969	Angiologie Untersuchung	10.05.2017 13:52:13	US	1	3		369464	7536612	Completed	Female	Unspecified	
		06.09.1969	Angiologie Untersuchung	26.04.2017 11:56:20	US	1	6		369464	7529557	Completed	Female	Unspecified	
		06.09.1969	Angiologie Untersuchung	12.04.2017 00:00:00	US	0	0		369464	7523795	Completed	Female	Unspecified	
		18.12.1993	Handgelenk re	22.10.2016 19:25:31	CR	2	2		143417	7432904	Completed	Male	Unspecified	
		14.02.1942	Kardiologie Ultraschall	27.09.2016 15:40:44	US	4	3443		294828	C94213	Read Offline	Male	Unspecified	
		14.02.1942	Angiologie Untersuchung	23.09.2016 11:31:21	US	1	12		294828	7418793	Completed	Male	Unspecified	
		14.02.1942	CT Schädel mit CTA extra	23.09.2016 10:49:57	CT	12	3137		294828	7418778	Completed	Male	Unspecified	
		01.11.1951	DEXA (Osteodensitometrie)	02.09.2016 10:48:00	NM	7	6		15996	7405312	Completed	Female	Unspecified	
		01.01.1943	Kardiologie Angiographie	30.05.2016 07:00:41	XA	74	1952		159583	C90201	Read Offline	Male	Unspecified	
		13.02.1965	Ultraschall Muskulo-Skeletal	22.04.2016 08:00:23	US	1	7		214849	7342309	Completed	Female	Unspecified	
		13.02.1965	Gastroenterologie Klinik	11.04.2016 10:53:57	US	1	12		214849	VPUSE94308	Read Offline	Female	Unspecified	
		13.02.1965	Frauenklinik	07.03.2016 14:41:11	US	1	9		214849	VPFDB85175	Read Offline	Female	Unspecified	

- Studie offline
- Dokumentation vorhanden
- Studie ohne Bilder



Viewport Ansicht:

Hauptmeneuleiste (Ausführung nächste Seite)

**Filtermöglichkeit auf den Modalitätstyp im Navigator**

**Navigator Studienbereich**  
 Hier finden sich alle Vorgeschichtswerte des Patienten  
 Anwahl einer Untersuchung lädt diese in den Serienbereich des Navigators  
 Alle blau unterlegten Untersuchungen werden aktuell im Viewport dargestellt

**Navigator Serienbereich**  
 Hier finden sich alle Serien zur angewählten Studie aus dem Studienbereich  
 Anwahl einer Serie lädt diese in den aktiven Viewport, alternativ auch per drag and drop  
 Alle blau unterlegten Serien werden aktuell angezeigt  
 Das Notizzettel Icon öffnet/schließt den Befund


**Series Selector / Serien Auswahl**  
 Zugriff auf alle Studien/Serien des Patienten  
 Direkte Belegung des Viewports per Auswahl aus dieser Liste

**Rechte Maustaste Kontext Menu, erweiterte Funktionen zur Hauptmeneuleiste**  
 Global Stack – alle Serien einer Studie werden zu einer Serie zusammengefasst  
 Cine Modus aktivieren  
 Dicom Informationen aufrufen  
 Bild Export

Alle	CT	MR	US			
[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]
[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]
▶	01.03.2018	US	Sonographie Neurologie	1/28	CPACS	
▶	06.06.2017	US	Sonographie Neurologie	1/36	CPACS	
▶	07.12.2016	US	Sonographie Neurologie	1/42	CPACS	
▶	29.09.2016	US	Sonographie Neurologie	1/9	CPACS	
▶	27.09.2016	US	Kardiologie Ultraschall	4/3443	CPACS	
▶	26.09.2016	US	Sonographie Neurologie	1/45	CPACS	
▶	24.09.2016	MR	MR Schädel	6/322	CPACS	
▼	23.09.2016	CT	CT Schädel mit CTA extra	12/3137	CPACS	
▶	23.09.2016	CT	CPACS_RI	2/0		
▶	23.09.2016	CT	Schaedel Weichteil 5.0 nativ	43		
▶	23.09.2016	CT	Schaedel Knochen 5.0 nativ	43		
▶	23.09.2016	CT	Schaedel Weichteil 0.5 nativ	561		
▶	23.09.2016	CT	Angio Carotis 0.5 CTA CE	1107		
▶	23.09.2016	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Cor-MIP...	60		
▶	23.09.2016	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Sag-MIP...	48		
▶	23.09.2016	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Av-MIP...	106		
▶	23.09.2016	CT	Schaedel Weichteil 5.0 KM CE	43		
▶	23.09.2016	CT	Schaedel Weichteil 0.5 KM CE	561		
▶	23.09.2016	CT	3 KM CE	2		
▶	23.09.2016	US	Angiologie Untersuchung	1/12	CPACS	



## Hauptmenueleiste:

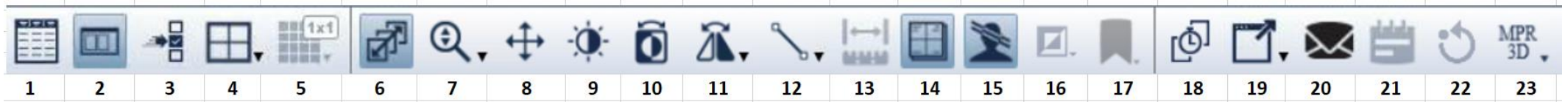

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – zurück zur Arbeitsliste</li> <li>2 – Navigator ein-/ausblenden</li> <li>3 – Series Selector/ Serienauswahl</li> <li>4 – Monitor Layout<br/>(Monitor Teilung um unterschiedliche Serien/Studien anzuzeigen)</li> <li>5 – Blatt Layout<br/>(Monitor Teilung innerhalb einer Serie)</li> <li>6 – Scrollen/Blättern</li> <li>7 – Zoom/Vergrößern</li> <li>8 – Verschieben</li> <li>9 – W/L Werte ändern</li> <li>10 – Invertieren</li> <li>11 – Drehen und Kippen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12 – Anmerkungen/Messwerkzeuge</li> <li>13 – Messschieber/Lineal für EKG Auswertungen</li> <li>14 – Bildüberlagerungen ein-/ausblenden</li> <li>15 – Querverweis ein-/ausblenden</li> <li>16 – Präsentationsstand auswählen/speichern</li> <li>17 – Lesezeichen anzeigen (ab CPACS und EA 6 SP7 möglich, beinhaltet dann ausschließlich Primärstudien, keine Vergleichsstudien)</li> <li>18 – manuelle Schichtsynchronisation</li> <li>19 – Aufruf externer Anwendungen</li> <li>20 – Studien URL teilen</li> <li>21 – Befund öffnen/schließen</li> <li>22 – Änderungen zurücksetzen</li> <li>23 – MIP/MPR</li> </ul> |
|---|--|

## Schnellzugriff Schaltflächen für Serien Auswahl, Scrollen/Blättern, Vergrößern und Fensterwert Änderungen:



### Eine Anwahl dieser Schaltflächen mit der linken Maustaste:

1. aktiviert die Scrollfunktion (Scrollen/Blättern in Kombination mit der Shift Taste wird die Geschwindigkeit erhöht, Bilder werden dabei übersprungen)
2. öffnet den Series Selector / die Serienauswahl
3. aktiviert den Zoom / die Vergrößerung
4. aktiviert Fensterwert Änderungen / Window/Level Änderungen
5. aktiviert den Schieberegler zur Bildnavigation / Scrollen

### Weitere Maustastenbelegungen:

1. Rollen des Mousrades = Scrollen/Blättern
2. Gedrücktes Mousrad = Zoom
3. Gedrückte rechte Maustaste = Fensterwert Änderungen (Window/Level)